

## DATENBLATT

---

Der positive endexpiratorische Druck (PEEP) wird allgemein verwendet, um eine adäquate Oxygenierung des Blutes aufrechtzuerhalten. Der PEEP wird insbesondere bei der assistierten Beatmung von Frühgeborenen empfohlen.

Ein PEEP wird auch im Zusammenhang mit Lungenverletzungen, z. B. durch Ertrinken, empfohlen.

Das Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 ist bedingt MR-sicher nach ASTM F 2503.

Das Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 kann unter den folgenden Bedingungen sicher in einer MR-Umgebung verwendet werden:

- Statisches Magnetfeld von 7 Tesla und weniger, mit:
- Maximalem räumlichen Feldgradienten von 16.000 G/cm (160 T/m)
- Maximalem Kraftprodukt von 721.000.000 G<sup>2</sup>/cm (721 T<sup>2</sup>/m)

Das Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 sollte nicht während einer laufenden Untersuchung in der MRT-Öffnung verwendet werden, da dies die MR-Bildqualität beeinträchtigen kann.

Das Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 ist zwischen 1,5 - 20 cmH<sub>2</sub>O einstellbar. Es hat einen Anschluss mit einem Innendurchmesser von 30 mm.

# Ambu® Einweg-PEEP-Ventil (bedingt MR sicher)



## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

---

Das Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 kann zwischen 1,5 und 20 cmH<sub>2</sub>O eingestellt werden

Die Ambu PEEP-Ventile wurden entwickelt, um einzigartige Widerstandseigenschaften bei der Verwendung mit manuellen Beatmungsbeuteln, Beatmungsgeräten, Anästhesiegeräten und CPAP-Systemen zu bieten

Die Ambu PEEP-Ventile können direkt an das Patientenventil jedes original Ambu Beatmungsbeutels ohne zusätzliche Adapter angeschlossen werden

# Ambu

## BESTELLINFORMATIONEN


Artikelnummer	Bezeichnung	Stück/VE
199 102 001	Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 mit 30 mm Konnektor	8
199 103 001	Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 mit 30 mm Konnektor und 22 mm Adapter für Beatmungs-/CPAP-Systeme	8

## MATERIALIEN

Produkt	Material
Transparente Kunststoffteile	Polycarbonat
Kunststoffteile des Ventilgehäuses	Polycarbonat mit Silikonscheibe und Silikonöl
Einstellkappe	Polypropylen
Dichtung in Einstellkappe	NBR-Gummi
Feder	Rostfreier Stahl (nicht magnetisch)

## GRÖSSE

Abmessungen	
Länge	65 - 76 mm (abhängig von der Einstellung), Durchmesser 45 mm
Gewicht	ca. 35 g

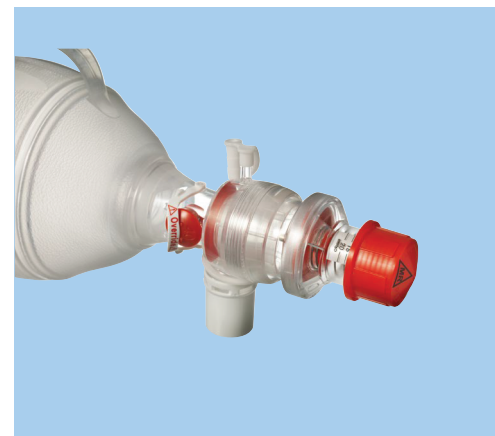

Einweg-PEEP-Ventil 20

# Ambu

Ambu GmbH  
Steinkopfstraße 4  
61231 Bad Nauheim  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0  
ambu.de

🏠 **Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
ambu.com

CE<sub>2797</sub>

US: Rx only