


# Ambu® IV Trainerarm

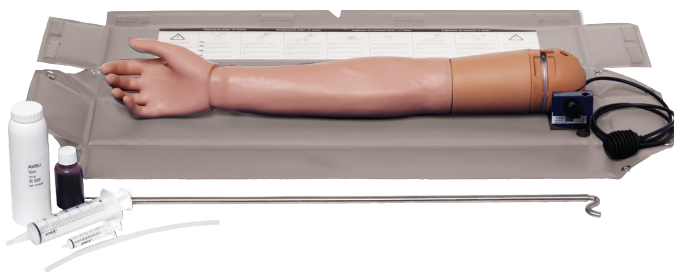

## Die wichtigsten Vorteile

- Austauschbare Haut und Venen
- Bewegliches Handgelenk und drehbarer Arm
- Multifunktionstragetasche
- Passend für alle Ambu Trainingspuppen, die für das Anbringen von Armen geeignet sind
- Indikator an der Schulter
- Ventilsystem
- Lieferung inkl. Infusionsständer, 5 und 50 ml Spritze zur Befüllung, Überlaufschlauch, rotem Farbkonzentrat, Talkum und Tasche geliefert

## Ambu® IV Trainerarm

Mit dem Ambu I.V.-Trainerarm lassen sich die Punktion mit Kanülen und Kathetern, die Infusion, die Injektion von Medikamenten, die Blutentnahme und das Tasten eines manuell erzeugten Radialispulses üben. Er kann auf der mitgelieferten Übungsmatte oder an einem passenden Trainingsgerät zum Einsatz kommen.

### Austauschbare Haut und Venen

Die Blutgefäße und die Haut bestehen aus Latex und sind austauschbar. Sie schließen nach dem Einstich sauber ab, wodurch eine hohe Langlebigkeit erreicht wird.

### Flexible Gelenke

Das flexible Handgelenk und der drehbare Arm gewährleisten ein realistisches Trainingsgerät, vor allem bei der Platzierung eines Katheters auf dem Handrücken.

### Indikator

Im Bereich der Schulter befindet sich ein Indikator, der die Blutgefäße repräsentiert. Anhand dieses Indikators kann überprüft werden, ob beispielsweise eine Infusion korrekt durchgeführt wurde.

### Ventilsystem


Das Ventilsystem verhindert, dass sich Luftblasen in den Blutgefäßen bilden.

## Technische Daten

Bauteil	Größe
Gewicht	3 kg
Länge	68 cm
Behältervolumen	260 ml
Größe Tragetasche	75 x 15 x 11 cm

## Bestell-Informationen

Artikel-Nummer	Artikelbezeichnung
A 255 001 000	Ambu I.V-Trainerarm mit Infusionsständer, 5 und 50 ml Spritzen, Überlaufschlauch, rotem Farbkonzentrat, Talkum und abwaschbarer Tragetasche

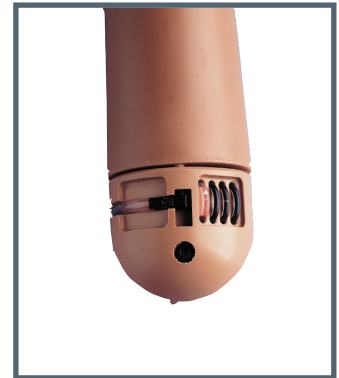


Ambu IV Trainerarm

## Material

Bauteil	Material
Haut	Natürliches Latex
Arm und Hand	PVC, hard
Venen und Arterien	Natürliches Latex
Indikator	Silikon
Tragetasche	Nylon



Zubehör für Ambu IV Trainerarm

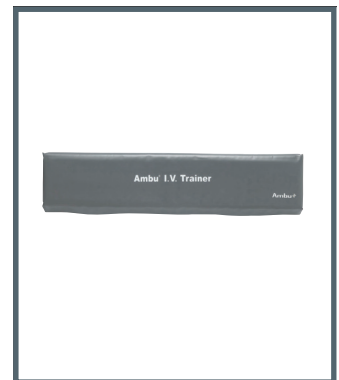

In stabiler Tragetasche verpackt

**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 DK-2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel. +45 72 25 20 00  
 Fax +45 72 25 20 50  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 D-61231 Bad Nauheim  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de