

Ambu CPR-Software - So ändern Sie die Icons für Ihre Ereignisse

Öffnen Sie die Ambu CPR-Software


Klicken Sie auf „Neue Trainingseinheit starten“ (links oben)



Alternativ können Sie über „Datei“ → „Neue Trainingseinheit“ fortfahren.




Wählen Sie den gewünschten Algorithmus

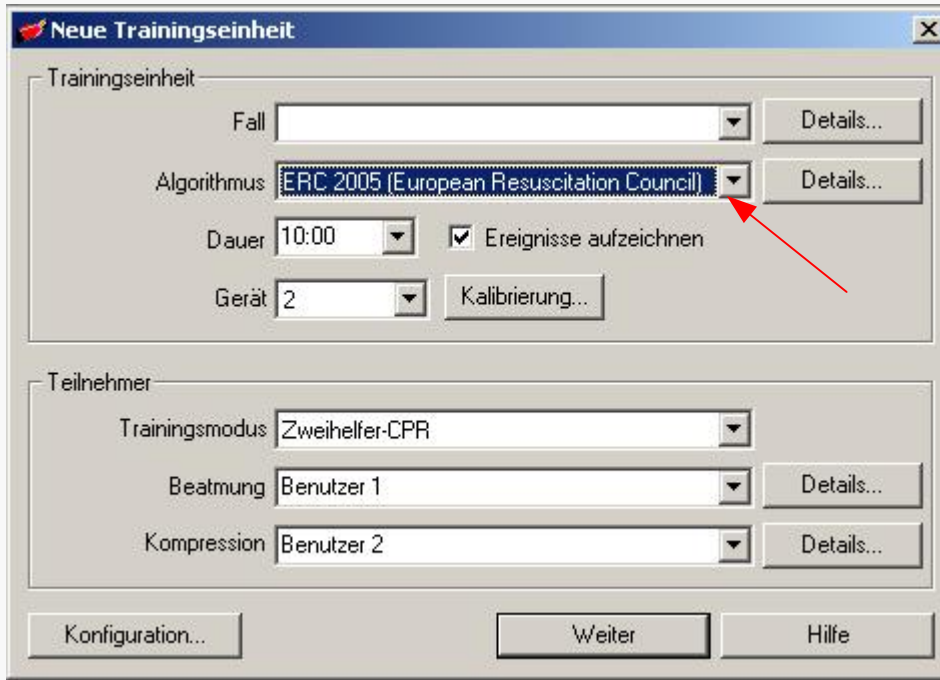

The screenshot shows the 'Neue Trainingseinheit' dialog box. The 'Algorithmus' dropdown menu is open, showing 'ERC 2005 (European Resuscitation Council)' selected. A red arrow points to this selection. Other fields include 'Fall', 'Dauer' (10:00), 'Gerät' (2), and 'Ereignisse aufzeichnen' (checked). The 'Teilnehmer' section has 'Trainingsmodus' (Zweihelfer-CPR), 'Beatmung' (Benutzer 1), and 'Kompression' (Benutzer 2). Buttons at the bottom include 'Konfiguration...', 'Weiter', and 'Hilfe'.


Wählen Sie den gewünschten Fall. Sie können zwischen den vorgegebenen oder selbst erstellten Fällen auswählen.

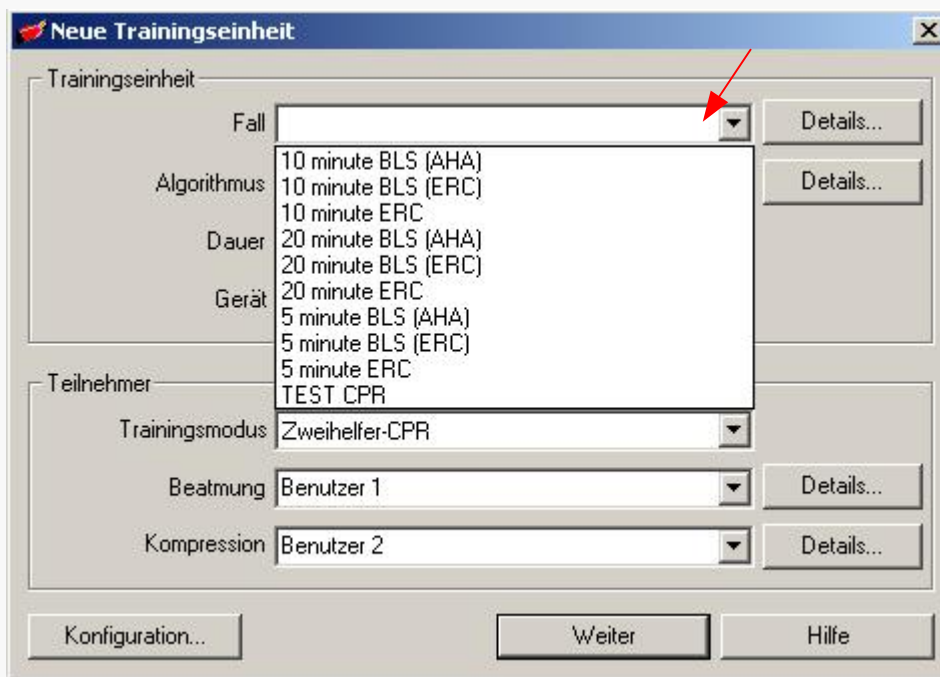

The screenshot shows the 'Neue Trainingseinheit' dialog box with the 'Fall' dropdown menu open. A red arrow points to the dropdown arrow. The menu lists various cases: '10 minute BLS (AHA)', '10 minute BLS (ERC)', '10 minute ERC', '20 minute BLS (AHA)', '20 minute BLS (ERC)', '20 minute ERC', '5 minute BLS (AHA)', '5 minute BLS (ERC)', '5 minute ERC', and 'TEST CPR'. Other fields are the same as in the previous screenshot.



Unter „Details“ können Sie einen bestehenden Fall bearbeiten, bzw. einen eigenen Fall erstellen.

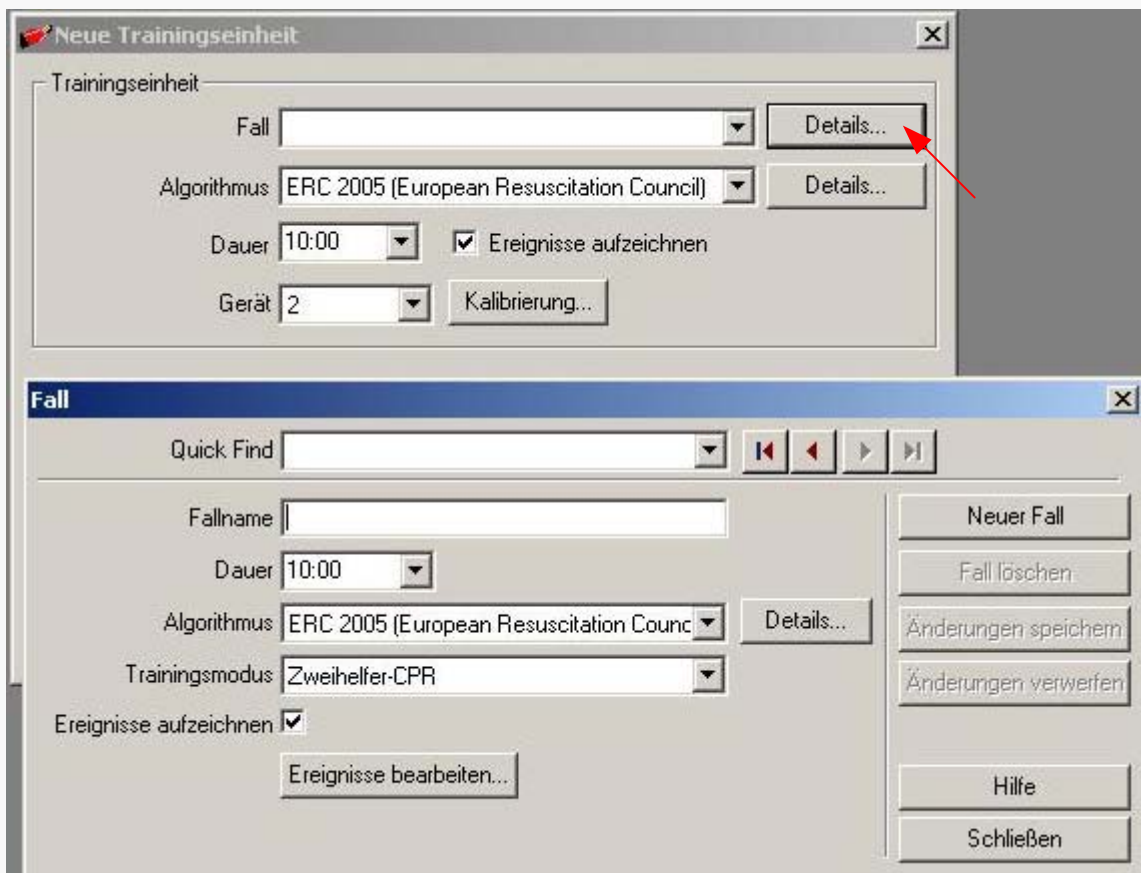



Stellen Sie die gewünschten Parameter ein und vergeben Sie ggf. einen Fallnamen.

Unter „Ereignisse bearbeiten“ gelangen Sie zu den Icons.





Sie können Icons löschen, hinzufügen und die Reihenfolge ändern.


Durch Klicken auf „Hinzufügen“ gelangen Sie in das Fenster um entsprechende Änderungen vorzunehmen.



Der längste Symbolname bestimmt die Breite der Icons im Fenster „Trainingseinheit“. Um mehr Symbole verwenden zu können, kürzen Sie den längsten Symbolnamen!



Nach der Fallbearbeitung und der Iconeinstellung gelangen Sie, nach Schließen der Fenster, wieder zum Hauptmenü:

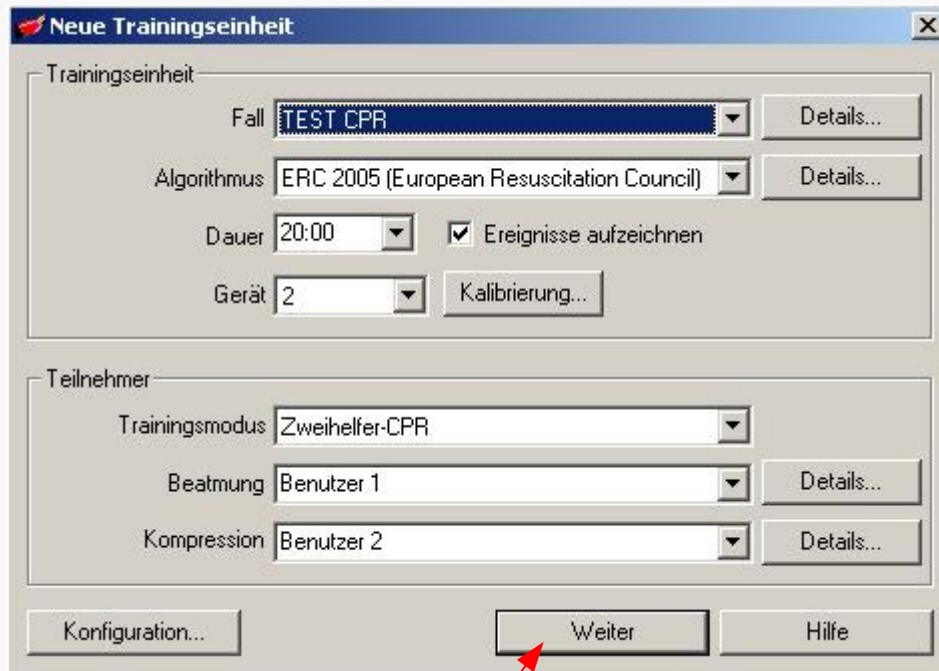

Neue Trainingseinheit

Trainingseinheit

Fall: TEST CPR Details...

Algorithmus: ERC 2005 (European Resuscitation Council) Details...

Dauer: 20:00 Ereignisse aufzeichnen

Gerät: 2 Kalibrierung...

Teilnehmer

Trainingsmodus: Zweihelfer-CPR


Beatmung: Benutzer 1 Details...

Kompression: Benutzer 2 Details...


Konfiguration... Weiter Hilfe

Durch Klicken auf „Weiter“ starten Sie die Trainingseinheit.



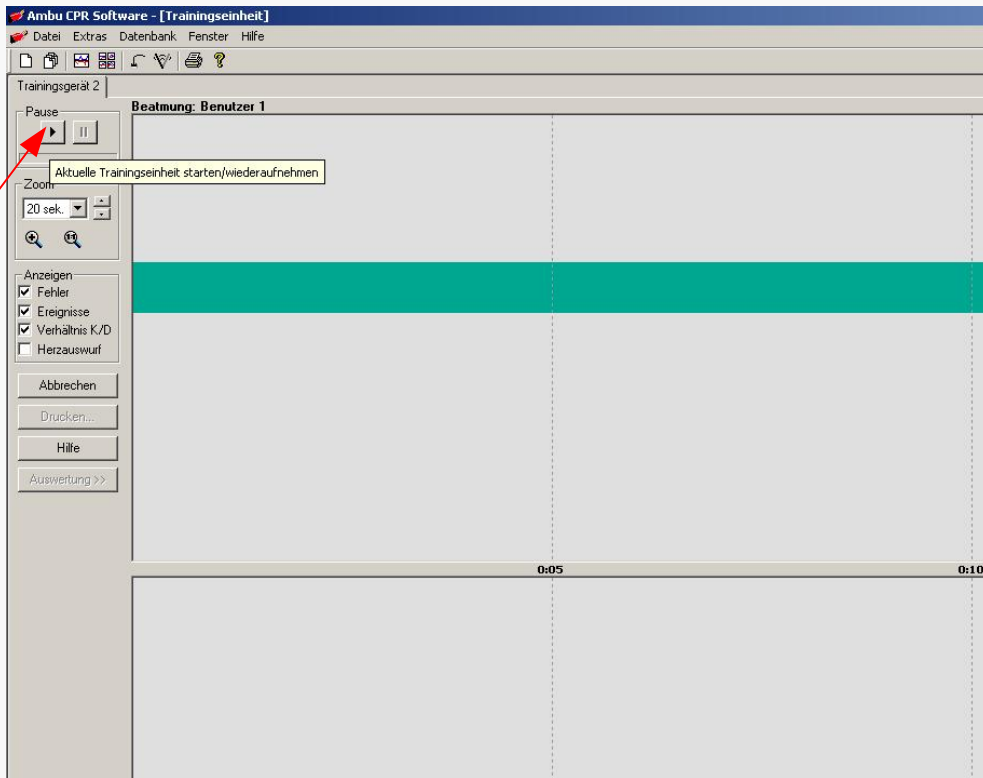

Über den Startbutton links oben, starten Sie den Trainingsdurchlauf und es erscheinen Ihre individuell eingestellten Icons:

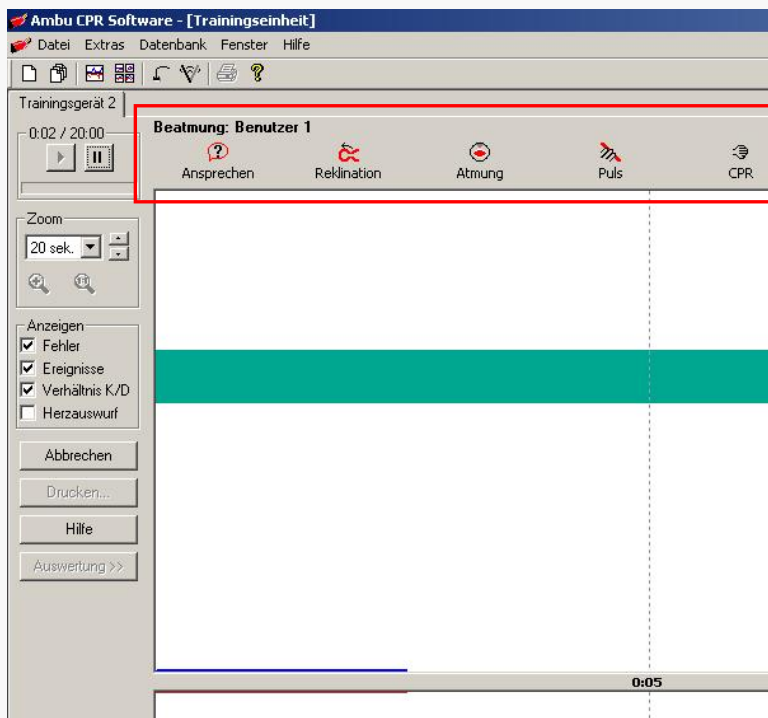

Ambu GmbH
 In der Hub 5
 61231 Bad Nauheim
 Deutschland
 Telefon: 06032 / 9250 – 0
 Telefax: 06032 / 9250 – 200
 www.ambu.de
 training@ambu.de

TRAINING

